

## FICHA TÉCNICA COMPRESA FRÍO/CALIENTE

REF: LH0079



Compresa reutilizable diseñada para terapias de frío o calor. Ideal para aliviar dolores musculares, inflamaciones, golpes y molestias en general.



### TERAPIA FRÍA

Reduce inflamaciones, hinchazón y alivia el dolor agudo.



### TERAPIA CALIENTE

Relaja músculos, alivia la tensión y mejora la circulación.



### REUTILIZABLE

Diseñada para múltiples usos. Económica y ecológica.



### SEGURA Y RESISTENTE

Material duradero y sellado herméticamente para evitar fugas.



### FLEXIBLE Y CÓMODA

Se adapta fácilmente a distintas áreas del cuerpo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |                         |                              |
|--|-------------------------|------------------------------|
|  | <b>DIMENSIONES</b>      | 13 cm (ancho) x 23 cm (alto) |
|  | <b>COLOR</b>            | Azul                         |
|  | <b>MATERIAL EXTERNO</b> | PVC de alta resistencia      |
|  | <b>CONTENIDO</b>        | Gel no tóxico                |
|  | <b>USO</b>              | Frío / Caliente              |
|  | <b>REUTILIZABLE</b>     | Sí                           |



### USO EN FRÍO

Colocar en el congelador por al menos 2 horas antes de usar.



Aplicar sobre el área deseada durante 15-20 minutos.



### USO EN CALIENTE

Calentar en microondas por 20-30 segundos (700-800W).



Verificar la temperatura y aplicar sobre el área deseada durante 15-20 minutos.



### PRECAUCIONES

No aplicar directamente sobre la piel. Usar siempre con una funda o paño. No sobrecalentar. No perforar. Mantener fuera del alcance de niños.



### ALIVIO EFECTIVO

Para dolores, golpes, esguinces y más.



### USO VERSÁTIL

En casa, oficina, deporte y primeros auxilios.



### BIENESTAR DIARIO

Tu aliado para una vida más saludable.



### CALIDAD GARANTIZADA

Productos diseñados para tu seguridad y confianza.